

# Pink Test Super Czuły - Test ciążowy płytkowy do użytku domowego



Cena: 12,00 pln

## Opis słownikowy

Producent	Hydrex Diagnostics
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

PINK Test Super Czuły to szybki i bardzo czuły test ciążowy o wysokiej precyzji, służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Czułość testu wynosi 10 mIU/ml a dokładność ponad 99,9 % (potwierdzona badaniami klinicznymi).

Wykonanie badania testem ciążowym PINK Test jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje się w czasie 1-5 minut.

Test ciążowy PINK Test Super Czuły należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 – 30°C). Nie zamrażać. Nie używać testu po terminie ważności. Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

Test wyjąć z aluminiowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

Do przeprowadzenia testu wystarczy próbka porannego moczu (jest najlepszy do badania ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG) zebrana do czystego i suchego naczynia. Zaleca się go przeprowadzić najwcześniej w pierwszym dniu po terminie przewidywanej miesiączki.

#### Jak wykonać badanie:

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu.

- Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.
- Tuż przed wykonaniem badania otworzyć kopertkę z testem i wyjąć z niej płytkę testową i plastikową pipetkę. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
- Płytkę testową umieścić na poziomej, płaskiej powierzchni.
- Za pomocą pipetki nabrać próbkę moczu. Końcówkę plastikowej pipetki zanurzyć w badanym moczu i ściskając górną część pipetki, napełnić ją moczem.
- Odmierzyć 3 pełne krople moczu do okienka na płytce testowej. Aby zapewnić poprawne wykonanie testu, pipetkę należy trzymać pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią płytki testowej tak, aby utworzyły się duże, swobodnie spadające krople, bez pęcherzyków powietrza.
- Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu w bibule przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekać, aż w okienku wynikowym pojawią się barwne prążki.
- Wynik testu odczytać po 2-5 minutach od momentu wprowadzenia moczu do okienka na płytce testowej.
- Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę. Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.


#### Zawartość opakowania:

- test w aluminiowej kopercie
- plastikowa pipetka
- instrukcja

#### Jak interpretować wynik testu:

#### Wynik dodatni (ciąża)

Na płytce pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama lub słabsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.

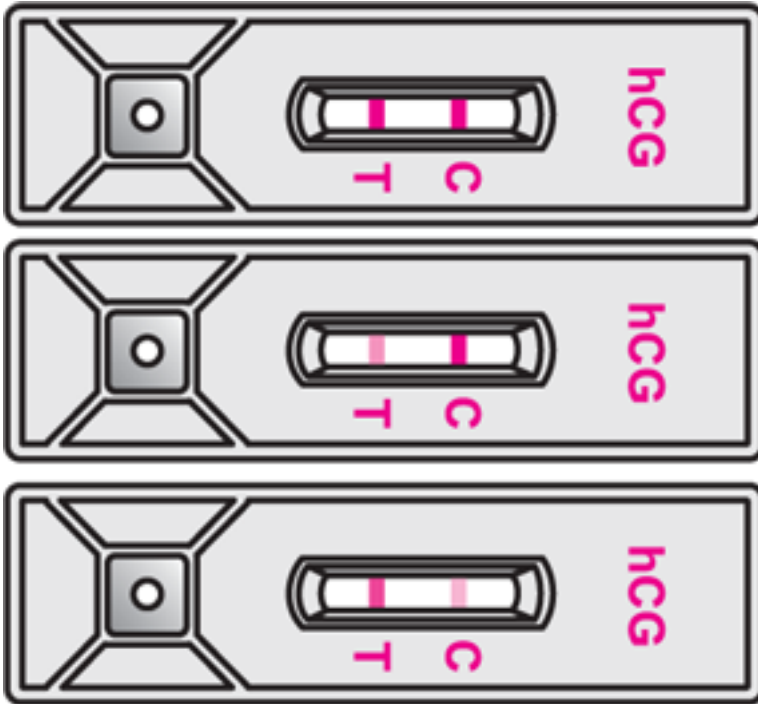

#### Wynik ujemny (brak ciąży)

Na płytce pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.



#### Wynik niejednoznaczny

W przypadku, gdy na płytce nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu ściśle przestrzegając instrukcji użycia.

