

Poduszka do obracania pacjenta AT03023

Cena: 149,90 pln



Opis słownikowy

Producent	Antar
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Poduszka do obracania pacjenta o wyprofilowanym kształcie z wycięciami na umieszczenie nóg pacjenta.

Wyrób **ułatwia opiekę nad osobami długotrwale lub stale leżącymi w łóżku**, w tym nad osobami starszymi, sparaliżowanymi lub niepełnosprawnymi. Dodatkowo jest pomocna podczas zastosowania znieczulenia ogólnego, występowania dysfunkcji poznawczych i fizycznych oraz u drobnych i szczupłych pacjentów.

Dzięki ergonomicznemu kształtowi poduszki, jej użycie **nie wymaga dużego nakładu siły** i jest bardziej komfortowe dla pacjenta.

Produkt jest odpowiedni do stosowania w sytuacji gdy osobę leżącą trzeba odwrócić w celu przebrania lub ułatwienia załatwienia potrzeb fizjologicznych.

Poduszka jest odporna na odkształcenia.

Czyszczenie i konserwacja:

Powierzchnię poduszki można czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki z dodatkiem detergentu i dezynfekować preparatami do dezynfekcji powierzchni takimi jak Velox Foam Extra, Surfa'Safe Premium lub Oxivir Plus Spray.

Poduszkę można prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie wolno suszyć w suszarce bębnowej, prasować, czyścić chemicznie i wybielać. Suszyć w stanie rozłożonym w cieniu.

Sposób użycia:

Poduszkę wsunąć pod nogi pacjenta i obrócić w pożądanym kierunku. Jeśli zaistnieje taka potrzeba poduszkę można zatrzymać w określonej pozycji dzięki zamocowanie jej do łóżka przy użyciu pasa mocującego.

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznej lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA: zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych i wilgoci.

Wymiary: 49 cm x 41,5 cm x 10,6 cm

Szerokość otworu na nogę: ok. 11 cm