

# Poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 z rozkładem nacisku - 6 cm

Cena od: 1 247,00 pln



## Opis słownikowy

Producent	VERMEIREN
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

**UWAGA: produkt na zamówienie. Termin realizacji około 7 dni. Zamówienia na poduszki i materace pneumatyczne realizujemy wyłącznie z formą płatności PRZEDPŁATA NA KONTO.**

Technologia VICAIR® opiera się na małych poduszczkach wypełnionych powietrzem, którymi wypełnione są poszczególne komory poduszki. Poduszcзки są wykonane ze specjalnego super wytrzymałego nylonu o niskim współczynniku tarcia co pozwala im na swobodne niczym nieograniczone przemieszczanie się względem siebie w ten sposób, pod obciążeniem pacjenta układają się idealnie do kształtu pośladków i ud i redukują do minimum ciśnienie. Poduszcзки praktycznie są niezniszczalne co względem innych poduszek pneumatycznych wyróżnia poduszki VICAIR® pod względem ekstremalnej trwałości. Technologia VICAIR® gwarantuje, że nie trzeba się już borykać z utratą ciśnienia jak to jest w innych poduszkach pneumatycznych, które jest wynikiem wad zawora lub uszkodzenia wynikłego z przebicia co praktycznie wyklucza dalsze używanie tych poduszek.

VECTOR O2 - poduszka pneumatyczna przeciwoleżynowo-stabilizacyjna. Do prania w pralce w całości.

#### Zalety:

W całości dająca się prać w pralce

Z higienicznego punktu widzenia, bardzo ważnym jest, że poduszkę można wyprać. Zwłaszcza w przypadkach gdzie występuje nie trzymanie moczy. Utrudnieniem jest konieczność usuwania zawartości poduszki przed praniem. Nowa poduszka VICAIR O2 pozwala umieścić ją w pralce w całości. Komórki SmartCells, które wypełniają poduszkę nie muszą być usuwane przed praniem. Dlatego poduszka jest idealna do stosowania w domach pomocy społecznej, oraz dla każdego, kto wymaga maksymalnej czystości poduszki. Poduszka VECTOR O2 jest pierwszą poduszką, którą można prać w całości w pralkach bez używania specjalnych worków do prania.

100% oddychalności i wentylacji

Otwarta struktura poduszki wektor O2 zapewnia 100% oddychalność i wentylację. Korzystanie z oddychającej poduszki poprawia kontrolę temperatury i wilgotności, zwiększa wygodę i zmniejsza działanie tarcia i sił ścinających na deformowanie tkanki, co zmniejsza ryzyko powstania odleżyn.

Unikalna konstrukcja

Vector O2 ma nie mniej niż 8 komór, każda spełniająca własną funkcję. Układ ten jest identyczny w standardowym modelu Vector. Dzięki unikalnej konstrukcji, poduszka zapewnia skuteczny rozkład ciśnienia, co czyni z niej idealną przeciwoleżynową poduszką. Anatomicznie ukształtowana powierzchnia siedziska zapewnia wysoki poziom stabilizacji i wspierania optymalnego pozycję siedzenia.

#### Zalety:

- anatomiczna kształt poduszki,
- optymalne zanurzenie i stabilizacja,
- wygoda i idealny rozkład ciśnienia,
- doskonałe pozycjonowanie uda,
- doskonała stabilizacja miednicy,
- niska waga-mniej niż 1kg,
- wytrzymałość do 250 kg,
- łatwa w użyciu,
- łatwa w utrzymaniu w czystości,
- ogromna trwałość,
- nie ma konieczności dopompowywania i okresowego sprawdzania poziomu ciśnienia.

#### Rozmiary poduszek (szerokość x głębokość):

- 1 - 35cmx40cm
- 2 - 40cmx40cm
- 3 - 40cmx45cm
- 4 - 40cmx50cm
- 5 - 43cmx43cm
- 6 - 45cmx45cm
- 7 - 45cmx50cm
- 8 - 50cmx45cm
- 9 - 50cmx50cm

