

Pomoc do nakładania skarpetek - LUX



Cena: 46,70 pln

Opis słownikowy

Producent

Herdegen

Opis produktu

Pomoc do nakładania skarpetek

Przeznaczenie:

Prosty przyrząd stworzony, aby ułatwić życie osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku i innym o ograniczonej sprawności ruchowej.

Konstrukcja:

Zasadniczą część przyrządu to kształtka wykonana z elastycznego, wzmocnionego polipropylenu do którego przymocowane są dwa składane teleskopowo pręty.

Używanie:

Nałożyć na kształtkę skarpetkę w taki sposób, aby zaczepiła o przygotowane występy boczne, co spowoduje jednocześnie wyciągnięcie się kształtki. Wsunąć stopę w powstałą szczelinę pomiędzy skarpetką a kształtką, a następnie używając tasiemek naciągnąć przyrząd wraz ze skarpetką na całą stopę. Gdy skarpetka zostanie naciągnięta, przyrząd wysunie się samoczynnie.