

Protefix Higiena - aktywne tabletki do czyszczenia protez - 66 szt.



Cena: 28,70 pln

Opis słownikowy

Producent	Queisser
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Tabletki Protefix dezynfekują protezę lub aparat ortodontyczny i zapewniają ich higieniczną czystość.

Preparat usuwa najtrudniejsze osady z kawy i herbaty likwiduje kamień nazębny. Wspierają ochronę jamy ustnej przed szkodliwymi bakteriami, będącymi źródłem stanów zapalnych i przykrego zapachu.

Przy regularnym stosowaniu Tabletki Protefix zapewniają uczucie świeżości. Aktywny tlen działa gruntownie i bezpiecznie, dociera do niedostępnych zagłębień i nie uszkadza materiału protezy.

Stosowanie:

1. Oczyszczyć protezę lub aparat przy pomocy szczoteczki.
2. Jedną tabletkę Protefix wrzucić do pół szklanki letniej wody.
3. Protezę umieścić w musującym roztworze tak, by była ona całkowicie zanurzona.
4. Po około 10 minutach (lub 3 minutach, jeśli oczekiwany jest jedynie efekt oczyszczenia) protezę można wyjąć i wyszorować szczoteczką pod bieżącą wodą lub dokładnie wypluć.

Protezę można pozostawić w roztworze na noc.

Uwaga: Nie stosować tabletek ani ich roztworu w jamie ustnej! Unikać kontaktu z oczami. W przypadku pomyłkowego połyknięcia – skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (nie zaleca się przechowywania w łazience), niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Składniki:

Potassium Caraoate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015 (color).

Opakowanie: 66 tabletek