

Protefix - krem mocujący do protez zębowych, z aloesem - 47g



Cena: 17,40 pln

Opis słownikowy

Producent	Queisser
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Protefix - krem z ekstraktem z aloesu do mocowania protez zębowych - zapewnia szybką i niezawodną pomoc przy problemach z prawidłowym trzymaniem się protezy.

Właściwości:

- silne działanie mocujące
- utrzymuje siłę mocowania przez wiele godzin (nawet przy nadmiernym wydzielaniu śliny)
- daje długotrwały komfort
- zapewniający ochronę przed uciskiem i uszczelnienie
- dzięki zawartości ekstraktu z aloesu działa kojąco

Stosowanie:

1. Krem nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
2. Małą ilość kremu nakładać (krótkimi odcinkami). Określenie jaka ilość kremu jest odpowiednia i nie wypłynie spod protezy może wynieść kilka prób.
3. Założyć protezę, przycisnąć ją i lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.

Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.

Po użyciu tubę dokładnie zamknąć, uważając by nie dostała się do niej woda i wilgoć, które po dostaniu się do wnętrza tubki mogą spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Podczas prawidłowego użytkowania kremu może dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.

Skład:

mieszanina soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinyloвого i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, ekstrakt Aloe Vera Barbadosensis, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoosan metylu.

Opakowanie: 47 g