


## Protefix - proszek mocujący do protez zębowych - 50g

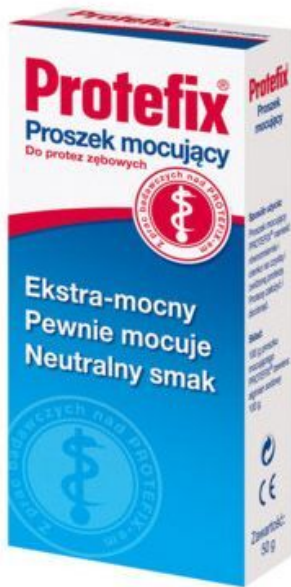

Cena: 21,45 pln

### Opis słownikowy

Producent	Queisser
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Protefix - Proszek mocujący do protez zębowych

#### Właściwości:

Protefix proszek mocujący extra-mocny.

Trzyma na mokro, nawet przy oszczędnym dozowaniu oraz odznacza się nieprzeciętną siłą mocującą i długim czasem działania.

Odpowiedni do stosowania w przypadku problemów niewielkich problemów z przyczepności lub rozrzedzoną śliną.

Jest neutralny w smaku i gwarantuje dobre trzymanie protezy także przy niewystarczającym wydzielaniu śliny.

Produkt wykonany jest z naturalnego alginianu sodu dzięki czemu jest szczególnie odpowiedni dla wrażliwych błon śluzowych jamy ustnej.

**Sposób użycia:**

Proszek mocujący Protefix rozsypać równomierną, cienką warstwą na wilgotną protezę. Po wsunięciu proteza jest mocowana na swoim miejscu w jamie ustnej.

W sytuacji gdy dochodzi do przedwczesnego rozluźnienia protezę ponownie posypać cienką warstwą proszku.

Pozostałości proszku można zmyć z protezy pod bieżącą wodą z użyciem szczoteczki. Uporczywe resztki usunąć wacikiem nasączonym olejem jadalnym.

Butelkę z proszkiem w trakcie dozowania należy trzymać pod kątem i delikatnie uderzać w nią palcem wskazującym.

W przypadku zastosowania za dużej ilości proszku może dojść do jego utwardzenia i może prowadzić do uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.

**Składniki:** alginian sodu

**Opakowanie:** 50g