

Setopress Bandaż do kompresjoterapii 10cm x 3,5m



Cena: 29,90 pln

Opis słownikowy

Producent	Mölnlycke
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Bandaż Setopress® o średniej do wysokiej sile ucisku, zapewnia stopniową kompresję podczas leczenia owrzodzenia żylnego goleni i terapii kompresyjnej. Cechą charakterystyczną bandaża są kolorowe prostokątne wskaźniki z obu stron - zielone oznaczające średni ucisk i brązowe oznaczające wysoki ucisk.

Właściwości:

- łatwy do zakładania
- zapewnia dwa poziomy kompresji (30 mmHg lub 40 mmHg)
- nie ogranicza mobilności
- jest na tyle lekki aby umożliwiać noszenie obuwia
- wyrób wielokrotnego użytku, może być prany dzięki czemu jest ekonomiczny w użyciu



Rozmiar: 10cm x 3,5m

Zawartość włókien: poliamid, elastan, bawełna

Zastosowanie:

Do leczenia owrzodzeń żyłakowych kończyn dolnych, odpowiedni do stopniowego uciskania.

Jak stosować

Na powierzchni bandaża nadrukowane są nieścieralne kolorowe prostokątne wskaźniki wizualne ułatwiające jego prawidłowe zakładanie. Po osiągnięciu właściwego naciągu bandaży prostokąty przyjmują kształt kwadratów.

Bandaż pozwala na uzyskanie dwóch poziomów kompresji. Po jednej stronie znajdują się brązowe prostokąty, które po osiągnięciu właściwego naciągu zapewniają ucisk 40 mmHg w stawie skokowym. Prostokąty o drugiej stronie bandaża mają kolor zielony i po uzyskaniu kształtu kwadratu zapewniają ucisk 30 mmHg w stawie skokowym.

Wyrobu nie należy stosować na kończynach o obwodzie mniejszym niż 18 cm oraz w przypadku wystąpienia lub podejrzenia niewydolności tętniczej.