

Surfa'Safe Premium - piana do mycia i dezynfekcji wyposażenia 750ml



Cena: 78,90 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor	ECOLAB
Pojemność	750ml
Producent	ANIOS

Opis produktu

Gotowy do użycia preparat w postaci aktywnej piany do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni i innych wyrobów medycznych.

Właściwości:

- możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni
- bardzo delikatny (bez zawartości alkoholu) - szczególnie polecany do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu i detergentów
- formuła produktu pozwala na bezpieczne stosowanie w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu - każda butelka posiada końcówkę spieniającą
- forma delikatnej pianki eliminuje ryzyko powstawania aerozolu
- z łatwością rozprowadza się i nie spływa z powierzchni pionowych

Działanie biobójcze:

- bakteriobójcze: 3 min, 20 stC (EN1040, EN13727, EN 13697, EN 14561)
- wobec prątków gruźlicy: M. terrae (EN 14348, EN 13697) - w 60 min, 20 st C
- drożdżakobójcze: 5 min, 20 st
- grzybobójcze: 20 min, 20 st (EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN, 14562)
- ograniczone wirusobójcze: 1 min, 20 st wobec HIV, PRV (surogat HBV), BVDV (surogat HCV), Vaccinia, Rota, Herpes (EN 14476); 5 min, 20 st wobec: Polyoma SV 40 oraz 30 min, 20 st wobec Adeno, Noro

Sposób użycia:

Produkt gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

Preparat w postaci dezynfekująco-myjącej piany nanieść bezpośrednio na dezynfekowaną powierzchnię, najlepiej na materiał nietkany i równomiernie rozprowadzić (+/- 6 ml/m² lub około 10 aplikacji).

Odczekać zalecany czas ekspozycji.

Po dezynfekcji nie zaleca się splukiwania powierzchni wodą, z wyjątkiem powierzchni mających kontakt z żywnością, ze skórą i błonami śluzowymi.

Produkt stosować w razie potrzeby lub zgodnie z obowiązującym Planem Higieny.

Skład:

Substancje czynne - chlorek didecyldimetyloamoniowy (Nr CAS 7173-51-5-3 mg/g), substancje pomocnicze.

Pojemność: 750ml