

Termofor gumowy bez pokrowca APTEO 2L

Cena: 21,60 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | Apteo |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Termofor gumowy przeznaczony do stosowania w celach profilaktyczno-leczniczych oraz do miejscowego ogrzewania ciała. Pomaga w naturalny sposób łagodzić ból. Dzięki niskiej zawartości gumy ma niedrażniący zapach. Zaletą termofory jest jego wysoka szczelność i dobra jakość.

Sposób użycia:

Trzymając termofor w pozycji pionowej za otwór wlewowy (pomoże to uniknąć rozpryskiwania) napełniać go powoli wodą do ok. 3/4 objętości.

Po napełnieniu zakręcić termofor za pomocą korka, aby uniemożliwić wyciekanie wody.

Termofor osiągnie maksymalną temperaturę po ok. 5-10 minutach.

Po zakończeniu stosowania termoforu odkręcić korek, wylać wodę, a następnie pozostawić otwarty termofor wlewem w dół, do całkowitego wysuszenia.

Należy zachować powyższe informacje do kolejnego użycia termoforu.

Środki ostrożności:

Przed użyciem sprawdzić szczelność

Nie używać wrzącej wody do napełniania termoforu, może to powodować uszkodzenie termoforu.

Termofor napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia.

Nie umieszczać termoforu w kuchence mikrofalowej.

Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi, ani u niemowląt. Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej.

Unikać silnego nacisku (np. siadania na wyrobie), aby nie spowodować pęknięcia.

Należy kontrolować powierzchnię termoforu podczas okresu użytkowania. W przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń zaprzestać jego stosowania.

Nie stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na część ciała, która będzie miała kontakt z termoforem. W

przypadku takiego kontaktu należy umyć termofor wodą z mydłem.

Unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu wyrobu ze skórą. Jeśli uzyskana temperatura jest zbyt wysoka należy owinąć termofor w ręcznik lub ściereczkę.

Objętość: 2 litry

Wymiary: 19x34 cm