

## Termofor z pestek wiśni w pokrowcu APTEO - różowy - 180g



Cena: 22,80 pln

### Opis słownikowy

Producent	Apteo
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Termofor z pestek wiśni w pokrowcu ze 100% bawełny w kolorze różowym, przeznaczony do miejscowego schładzania lub rozgrzewania ciała, łagodzący kolki niemowlęce i ból brzuszka.

**Kolor:** różowy

#### Zastosowanie:

Na zimno: w przypadku zwichnięć, guzów, bólów głowy, migren, ukąszeń insektów, lekkich poparzeń.

Na ciepło: w przypadku kolek pokarmowych u niemowląt, dolegliwości związanych z bólem brzucha, bólem kręgosłupa, bólami mięśni i stawów, przez matki karmiące do rozgrzewania piersi. Termofor działa relaksacyjnie, poprawia krążenie krwi.

#### Sposób użycia:

Termofor schładzać lub podgrzewać bez pokrowca, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie

#### Jako zimny okład

- termofor umieścić na 30-60 minut w zamrażarce

#### Jako ciepły okład

- termofor umieścić w mikrofalówce o mocy 300-600 W na maksymalnie 1 minutę
- termofor umieścić w piekarniku rozgrzanym do 120°C na około 4 minuty
- termofor położyć na grzejniku (kaloryferze) do momentu aż będzie wystarczająco ciepły

Na gotowy do użycia termofor założyć pokrowiec i przyłożyć go do miejsca wymagającego ogrzania lub schłodzenia. W zależności od temperatury otoczenia wyrób będzie utrzymywał temperaturę przez czas do 30 minut.

**Ostrzeżenia:**

Nie przegrzewać powyżej zalecanych warunków - może to grozić zapłonem pestek lub oparzeniem.

Termofor ogrzewać i schładzać bez pokrowca.

Unikać silnego nacisku np. siadania na termoforze - może to spowodować rozerwanie pokrowca.

Nie używać wyrobu gdy jest uszkodzony.

**Waga:** 180g