

Termometr bezdotykowy VisioFocus MINI



Cena: 147,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Tecnimed
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Termometr bezdotykowy VisioFocus MINI

Pierwszy na świecie termometr z projektorem temperatury.

Przeznaczony dla prywatnych użytkowników

Wyświetla temperaturę w czasie rzeczywistym na czole badanej osoby, przedmiotu lub cieczy.

Pomiar na środku czoła, powiece (oku), żyłe szyjnej.

Unikalny LED-owy sensor odległości,

Szybka ręczna kalibracja do temperatury otoczenia.

Pierwszy termometr wyłącznie z projektorem temperatury.

Termometr może być wykorzystywany do pomiaru temperatury w przedziale od 1°C do 55°C. Można dokonywać pomiarów temperatury ciała, otoczenia, wody do kąpieli, jedzenia i napojów dla niemowląt oraz napojów typu: kawa, wino, sok.

Termometr pracuje w systemie LED, który jest całkowicie bezpieczny.

Innowacyjną cechą produktu jest możliwość dokonania pomiaru nie tylko na środku czoła, ale przede wszystkim na powiece.

Możliwość zastosowania Automatycznej Kalibracji (AQCS) lub Szybkiej Ręcznej Kalibracji do temperatury otoczenia (MQCS).

Posiada sensor odległości, który w intuicyjny sposób pokazuje prawidłową odległość do pomiaru – wystarczy umieścić cyfry pomiędzy dwoma kropkami

Termometru nie trzeba włączać – jest zawsze gotowy do pomiaru.

Po dokonanych pomiarze można natychmiast wykonać kolejny pomiar.

Żywotność termometru oceniana jest na 10 lat ciągłej pracy.

Gwarancja 24 miesiące

Funkcje:

Przycisk „BUŻKA”, za pomocą którego dokonujemy pomiarów temperatury z czoła pacjenta, powieki lub żyły szyjnej

Przycisk „DOMEK”, który pozwala na mierzenie temperatury dowolnych przedmiotów i cieczy

Przycisk pamięci „MEM”, za pomocą którego możemy odczytać 9 ostatnich pomiarów dokonanych termometrem.

Istnieje możliwość wyboru 3 różnych trybów pomiaru (oralny, odbytniczy i pachwinowy)

zakres pomiaru ciała: 34°C – 42,5°C

zakres pomiaru przedmiotów: 1°C – 55°C

możliwość zmiany °C/°F

W termometrze istnieje możliwość wyboru 3 różnych trybów pomiaru (oralny, odbytniczy i pachwinowy).

Po wyborze innego trybu pomiary dokonywane są zawsze na środku czoła lub powiece (oku), a termometr odpowiednio przelicza wynik.

Visiofocus posiada dwa tryby kalibracji : manualną (MQCS) i automatyczną (AQCS).

W zestawie:

1 x Termometr Visiofocus mini

2 x baterie AAA

Instrukcja w języku polskim