

# TESTEO Test ciążowy HCG płytkowy do użytku domowego

Cena: 6,90 pln



## Opis słownikowy

Producent	Testeo
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Szybki i łatwy w obsłudze płytkowy test ciążowy do samodzielnego wykonania będący testem immunologicznym. Test przeznaczony jest do wykrycia ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (HCG) w moczu na wczesnym etapie ciąży.

Dokładność testu wynosi 99,96% skuteczności. Czułość testu 10mIU/ml, dzięki temu wykrywa bardzo wczesną ciążę.

W prawidłowym przebiegu ciąży, HCG można wykryć w moczu już 2-4 dnia po zapłodnieniu. HCG to hormon, który pierwszy wskazuje, że kobieta jest w ciąży. Pojawia się tuż po zapłodnieniu.

Wykonanie testu nie zajmuje więcej niż 2 minuty, a wynik odczytać można do 5 minut. Jeżeli wynik testu pokazuje wynik nieważny, czyli na pasku testowym nie pojawi się żadna kreska test należy powtórzyć po upływie 24 godzin.

### Wykonanie testu:

1. Zebrać próbkę moczu do pojemnika dołączonego do opakowania.
2. Wyciągnąć test i pipetę z foliowego opakowania.
3. Zanurzyć pipetę w pojemniku z moczem i ściskając szeroka część pipety pobrać próbkę moczu.
4. Położyć test na płaskiej powierzchni okienkiem do góry i w miejscu na próbkę umieścić 4-5 kropli moczu trzymając pipetę pionowo nad opakowaniem.
5. Po upływie 1-5 minut odczytać i zinterpretować wynik testu według oznaczeń na opakowaniu. Nie interpretować wyniku po 5 minutach.
6. Po wykonaniu testu wyrzucić go z pipetą i pojemnikiem na mocz do kosza.

**UWAGA:** Podczas pobieranie próbki zachować ostrożność aby w pipecie nie powstały pęcherzyki powietrza.

### Zawartość opakowania:

1. Sterylne opakowanie foliowe z płytkowym testem ciążowym, środkiem osuszającym i pipetą.
2. Pojemnik na mocz.
3. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Test ciążowy płytkowy TESTEO jest testem do samokontroli/samodzielnego wykonania w warunkach domowych.