

They-Ology™ Wearable Anal Training Set - zestaw do treningu analnego, plug - 5szt.

Cena: 264,90 pln



Opis słownikowy


Opakowanie	5 szt.
Producent	Calexotics

Opis produktu

Zestaw treningowy do ćwiczeń mięśni zwieraczy wykonany z bezpiecznego i przyjaznego dla skóry silikonu wysokiej jakości. Produkt stosuje się w celu stymulacji prostaty, będącej bardzo wrażliwym elementem męskiego ciała i stopniowego delikatnego rozciągnięcia mięśni. Produkt może wspomagać profilaktykę leczenia zaburzeń wzrodu.

W skład zestawu wchodzi 5 dylatorów o różnych rozmiarach przeznaczonych do treningu analnego, które można zakładać, aby stopniowo zwiększać przyjemność przy każdym użyciu. Jest to wyrób odpowiedni zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Każda sonda zakończona jest elastyczną podstawą z kołnierzem, zapewniającą wygodę, łatwość poruszania się i użytkowania.

Materiał z jakiego wykonano produkt to gładki, bezzwowy silikon premium, który jest bezpieczny dla ciała, bezzapachowy i wolny od ftalanów.

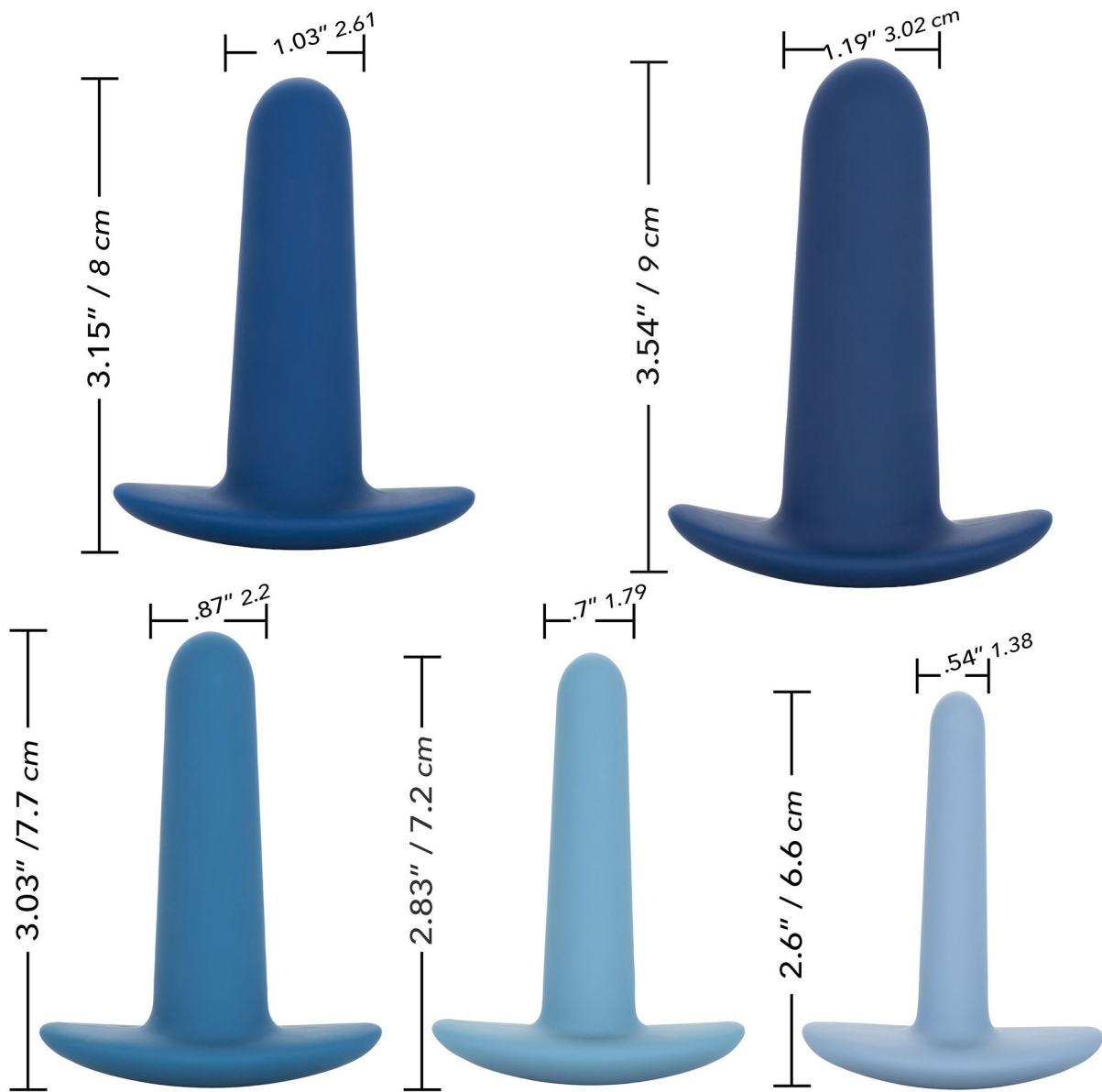

Sposób użycia:

Użytkowanie dilatora rozpocząć od najmniejszego rozmiaru.

Produkt przed i po każdym użyciu umyć ciepłą wodą z dodatkiem bezzapachowego mydła.

Przed aplikacją na dilator nałożyć lubrykant na bazie wody, przyjąć komfortową, leżącą pozycję na boku z kolanami uniesionymi do klatki piersiowej.

Zrelaksować się, wziąć kilka głębokich oddechów i używając dominującej ręki, sięgnąć do odbytu i wprowadzić gadżet. W przypadku odczuwania dyskomfortu lub pojawienia się krwawienia nie wprowadzać produktu przy użyciu siły.

Po umieszczeniu produktu w odbycie, zacząć wykonywać dilatorem ruchy okrężne lub w tył i w przód delikatnie go wpychając, rozciągając przy tym jednocześnie mięśnie.

Za każdym razem kiedy przyrząd jest aplikowany pamiętać należy o użyciu lubrykantu.

Celem ćwiczeń jest delikatne rozciągnięcie mięśni zwieraczy, zwiększenie komfortu i przyjemności oraz dojście do stosowania największego rozmiaru bez odczuwania dyskomfortu

Aby wyjąć dilator, należy się rozluźnić i przy normalnym oddychaniu delikatnie go pociągnąć. Ciało może stawiać opór, co jest normalne, należy wtedy kontynuować wyciąganie.

Zaleca się używać dilatora 2-4 razy w tygodniu przez 5-30 minut w zależności od stopnia komfortu.

W przypadku pojawienia się obrzęku, krwawienia, wysypki lub urazów o okolicy odbytu, zaprzestać użytkowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Kolor: odcienie niebieskiego

Materiał: silikon

Właściwości: wolny od ftalanów, wodoodporny

Wymiary:

Dilator 1: 6,6 cm x 1,38 cm

Dilator 2: 7,2 cm x 1,79 cm

Dilator 3: 7,7 cm x 2,2 cm

Dilator 4: 8 cm x 2,61 cm

Dilator 5: 9 cm x 3,02 cm

Opakowanie: 5 szt

Galeria

