

# Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe MEDIBAG 190 x 330mm

Cena: 114,00 pln



## Opis słownikowy

Opakowanie	200 szt.
Producent	MEDILAB
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Rozmiar: 190mm x 330mm  
Ilość: 200szt.

Jednorazowe opakowania medyczne, zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 868-3 i 5 oraz PN-EN ISO 11607-1 i 2, stosowane do bezpiecznej sterylizacji parą wodną.

### Charakterystyka:

- Torebki samoprzylepne eliminują potrzebę użycia zgrzewarki.
- Wstępnie złożone w celu ułatwienia prawidłowego zamknięcia opakowania.
- Wyposażone w wycięcie na kciuk na szczycie opakowania ułatwiające otwarcie pakietu

### Wskaźniki procesu

- Na opakowaniu nadrukowano zewnętrzne i wewnętrzne wskaźniki poszczególnych procesów sterylizacji określające prawidłowy przebieg procesu.
- Wskaźnik sterylizacji parą wodną
- Jednoznaczna zmiana zabarwienia danego wskaźnika wskazuje na prawidłowy przebieg procesu
- Z uwagi na nieprzepuszczalność folii dla czynnika sterylizującego oraz na warunek, iż wskaźnik chemiczny procesu powinien być tak umieszczony, aby był poddany takim samym warunkom sterylizacji jak sterylizowany wyrób, wszystkie wskaźniki zostały umieszczone poza przestrzenią pakowania, na papierze od strony folii, w obrębie zgrzewu fabrycznego.

### Warstwa foliowa

- Wielowarstwowa, bez rozwarstwień, wolna od porów, wad, substancji obcych i toksycznych.
- Optymalna grubość folii – 52 µm – składająca się z sześciu warstw, wytrzymała i odporna na rozerwanie.

### Warstwa papierowa

- Papier medyczny o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Dobrej jakości papier pozwala na uniknięcie tzw. podwójnego pakowania.
- Specjalna charakterystyka papieru zapewnia odpowiednią barierę mikrobiologiczną dla drobnoustrojów.

### Zgrzew

- Trójścieżkowy zgrzew redukuje do minimum pylenie włókien oraz zmniejsza ryzyko zniszczenia opakowania podczas załadunku.
- Wyposażone w tzw. zgrzew zabezpieczający, który chroni opakowanie przed zniszczeniem przy pakowaniu, transporcie i przechowywaniu.
- Dodatkowe zgrzewy narożne zapobiegające zawijaniu folii na rogach.

#### **Nadruk**

- Umieszczony na papierze w obrębie zgrzewu fabrycznego, przy użyciu atramentu na bazie wody, poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi.
- Każdą torebkę opatrzone odpowiednim numerem serii.
- Czytelne oznakowanie w języku polskim.