

UrgoClean opatrunek oczyszczający ranę 6x6cm - 1 szt.

Cena: 5,70 pln



Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opatrunek wykazujący działanie oczyszczające ranę zbudowany z włókien poliabsorbentu i gojącej macierzy TLC (technologia lipido-koloidowa) wskazany do stosowania w fazie oczyszczania rany.

Wskazania:

- rany nowotworowe
- rany ostre: rany pourazowe, rany pooperacyjne, oparzenia, otarcia skóry
- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych

Właściwości:

- wykazuje kompleksowe działanie oczyszczające - usuwa z rany wysięk, martwicę rozpułwną i obumarłe tkanki
- wchłania wysięk wertykalnie i utrzymuje go w swojej strukturze zapewniając jednocześnie ochronę skóry wokół rany
- dzięki wysokochłonnym właściwościom włókien poliakrylanu, pochłania i wiąże bakterie
- stymuluje proliferację fibroblastów
- ma właściwości hemostatyczne
- dzięki żelującej matrycy TLC utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko rany
- jest odporny na rozciąganie, można go bezboleśnie i bezurazowo zdjąć w jednej części
- nie przywiera do rany i nie niszczy nowo powstałej tkanki
- może być używany w terapii kompresyjnej
- przebadany klinicznie

Sposób aplikacji:

Oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej, jeśli wcześniej zastosowano preparat antyseptyczny, ranę przepłukać należy solą fizjologiczną.

Z opatrunku zdjąć folię ochronną i zaaplikować go bezpośrednio na ranę "lepka" stroną zwróconą w stronę rany.

Jeśli opatrunek jest za duży można go przyciąć, tak aby był ok. 1-2 cm większy od brzegów rany.

Opatrunek w fazie oczyszczania z tkanek martwiczych należy zmieniać co 1-2 dni, w kolejnych etapach - i w zależności od stanu

klinicznego rany i wysięku opatrunkiem zmieniać w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż co 7 dni.

UrgoClean stosować należy z opatrunkiem wtórnym. W zależności od stopnia wysięku i umiejscowienia rany można go dopasować spośród nieprzylepnych opatrunków piankowych UrgoTul Absorb lub absorpcyjnych z silikonowym przylepcem UrgoTul Absorb Border.

Rozmiar: 6x6 cm