

## UrgoClean Rope opatrunek oczyszczający 40x5cm - 1 szt.

Cena: 27,20 pln



### Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Opatrunek w postaci taśmy zbudowanej z włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) wykazujący działanie oczyszczające. Produkt wskazany w fazie oczyszczania z tkanek martwiczych w ranach jam ciała, ranach tunelowych, drążących, przetokowych.

#### Wskazania:

- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej
- rany ostre: pourazowe, pooperacyjne
- rany nowotworowe

#### Właściwości:

- wchłania wysięk i zatrzymuje go w swojej strukturze, dzięki czemu chroni skórę wokół rany
- pochłania, wiąże i drenuje wysięk surowiczy z ran pooperacyjnych
- poprzez pochłanianie i drenaż tkanek martwiczych i bakterii z ran przewlekłych wykazuje kompleksowe działanie oczyszczające
- ułatwia mechaniczne oczyszczanie rany
- posiada właściwości hemostatyczne
- umożliwia bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- odporny na rozciąganie, co pozwala na zdejmowanie opatrunku w jednej części
- w zestawie ze sterylnym miernikiem ułatwiającym aplikację oraz ocenę głębokości rany
- przebadany klinicznie
- łatwy w zastosowaniu

#### Sposób aplikacji:

Oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej. W przypadku wcześniejszego zastosowania antyseptyku, przed założeniem opatrunku ranę przepłukać solą fizjologiczną.

Jeśli istnieje taka potrzeba, użyć dołączonego sterylnego miernika do oceny głębokości rany. Zaaplikować UrgoClean Rope przy minimalnym nacisku.

Jeśli trzeba opatrunek można przyciąć jałowymi nożyczkami i dostosować długość produktu do głębokości rany.

W przypadku ran o niewielkim wysięku, konieczne może być wcześniejsze zwilżenie opatrunku UrgoClean Rope za pomocą soli fizjologicznej.

UrgoClean Rope wymaga zastosowania opatrunku wtórnego. W zależności od poziomu wysięku i lokalizacji rany, można dopasować warstwę wtórną spośród opatrunków z grupy UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.

W fazie oczyszczania rany z tkanki martwiczej UrgoClean należy zmieniać co 1-2 dni.

UrgoClean Rope wymaga zastosowania opatrunku wtórnego. Jego dobór jest uzależniony od stopnia wysięku i umiejscowienia rany, może to być UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.

**Rozmiar:** 40x5 cm