

# Varicex® S - opaska dziana z pastą cynkową 10cm x 5m (20 630)



Cena: 36,90 pln

## Opis słownikowy

Producent	Lohmann-Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Dziana opaska Varicex® S impregnowana pastą cynkową to bandaż bi-elastyczny (o rozciągliwości wzdłużnej i poprzecznej) o krótkim naciągu odpowiedni do bandaży typu Unna Boot przeznaczony do stosowania do kompresji, do stabilizacji i odciążania, a także do unieruchamiania pewnych części ciała.

Wyrób jest gotowy do użycia, szybki w zastosowaniu. Przy jego pomocy tworzy się półsztywne opatrunki stałe we wskazaniach takich jak: żylaki, przewlekła niewydolność żylna, leczenie obrzęku, zakrzepowe zapalenie żył, owrzodzenie podudzia w fazie gojenia oraz w okresie rekonwalescencji po złamaniach.

**Długość po rozciągnięciu:** 10cm x 5m

**Materiał nośny:** 80% wiskoza, 20% poliamid – powlekany pastą cynkową

### Właściwości:

- dobrze rozciągliwa
- bielastyczna - o rozciągliwości wzdłużnej i poprzecznej
- nadaje się także do stożkowatych części ciała
- odpowiednia do opatrunków wykonywanych techniką okrężną
- łatwa do nałożenia
- pakowana pojedynczo w woreczku z folii aluminiowej

### Wskazania:

- Wskazania flebologiczne i limfologiczne: żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, niewydolność żył głębokich, zespół pozakrzepowy, zakrzepica żylna, przewlekła niewydolność żylna w stadium I do III b (wg Widmera), owrzodzenie podudzia żylna i mieszane, obrzęki

(żyłne, limfatyczne, tłuszczowe, w tym pourazowe, pooperacyjne, w czasie ciąży), po skleroterapii i zabiegach chirurgicznych żył.  
- Kontuzje, skręcenia, urazy ścięgien i zwichnięcia.

**Przygotowanie do użycia:**

- Przed założeniem opatrunku oczyścić ewentualną ranę/opracować łóżysko oraz okryć opatrunkiem odpowiednio do jej stanu.
- Ewentualnie wyścielać narażone na ucisk miejsca.
- Opatrunek najlepiej zakładać rano przed wstaniem z łóżka lub po dłuższej chwili trzymania nogi w górze.
- Szerokość bandaża powinna odpowiadać średnicy części ciała, na którą ma być założony.

**Stosowanie:**

- Technikę nakładania zwojów opaski Varicex® S należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym leczenie.
- Aby uzyskać maksymalną ruchomość stawu, zaleca się zakładanie opatrunku na stopę zgiętą pod kątem prostym (90°).
- Opatrunek należy zakładać tak, aby nie powstały luki.
- Zawinięta część bandaża (zwój bandaża) jest zwrócona na zewnątrz. Zwój bandaża należy poprowadzić ciasno przy nodze/ramieniu.
- Jeżeli opatrunek ulegnie poluzowaniu, to należy go zmienić.
- Z uwagi na jego bi-elastyczność, bandaż Varicex® S można modelować bez wielokrotnego nacinania i docinania. Opatrunek gładko dopasowuje się do kończyny.
- Po założeniu, opatrunek z pastą cynkową należy zabezpieczyć za pomocą rękawa opatrunkowego tg ® lub opaski podtrzymującej.

Opaski z pastą cynkową Varicex® zużywają się w niewielkim stopniu - niezależnie od tego, czy stosowane są z elastyczną opaską w systemie okrężnym, czy systemie półsemkowym.

**Przeciwwskazania:**

Zastoinowa niewydolność serca, zaawansowana choroba tętnic obwodowych, posocznicze zapalenie żył, siniczny obrzęk bolesny, zaburzenia czucia w skórze, znane alergie i/lub nadwrażliwość na składniki produktu.