


Żel HyperOil do wszystkich rodzajów ran, owrzodzeń, odleżyn - ampułka 5 ml

Cena: 18,90 pln

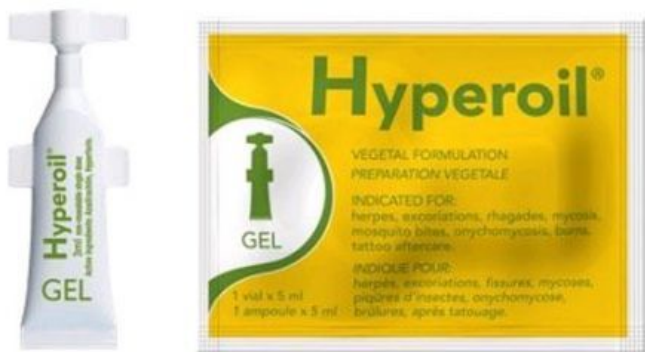

Opis słownikowy

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Producent | RI.MOS. |
| Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU | W.02.01 (P.141) |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |
| Rekomendowana forma transportu | POLTRAF |

Opis produktu

Hyper Oil - do wszystkich rodzajów ran oraz każdej fazie ich gojenia.

Opakowanie: 5ml ampułka
Nr katalogowy: 100501HY

Hyper Oil aktywnie wspomaga ziarninowacenie i odbudowę nabłonka, wpływa na regenerację fizjologiczną i odbudowę tkanki, jednocześnie zapobiega uszkodzeniom skóry wokół zmian, powikłaniom bakteryjnym, pasożytom oraz końcowemu zwłókniałemu zbliznowaceniu.

Hyper Oil to wielofunkcyjny samowystarczalny zaawansowany opatrunek, zapewniający regenerację i odbudowę skóry w przypadkach poważnych lub przewlekłych zmian skórnych:

- nie wymaga stosowania środków odkażających
- skraca terapię antybiotykową
- zatrzymuje infekcje i zmiany martwicze
- redukuje ból, opuchliznę zaczerwienienie
- wspomaga oczyszczanie rany
- zapobiega tworzeniu się strupa, ponieważ sprzyja mokremu gojeniu się rany
- stanowi ochronę dla tkanki wokół zmiany skórnej
- wspomaga tworzenie się tkanki ziarninowej oraz odbudowę nabłonka zapobiegając oszpeceniu
- redukuje tworzenie się blizn

Substancja czynna: Hyperforyna, Azadyrachtyna

Przeznaczenie: odleżyny, zespół stopy cukrzycowej, oparzenia, urazy skóry (nawet zainfekowane i z odsłoniętymi kośćmi), wszelkiego rodzaju wrzody, przetoki, pęknięcia skóry, popromienne zapalenia skóry, pooperacyjne zmiany skórne, wrosnięte paznokcie, hemoroidy, ropnie, transplanty skórne, otarcia, opryszczka, egzemy, grzybice, grzybice paznokci, zanokcice, trądzik wirusowy, pokrzywka, świąd

okolic intymnych, odmrożenia, ugryzienia komarów, a także wiele innych schorzeń...

Instrukcja użycia:

- ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej
- nie dezynfekować!
- osuszyć gazowym jałowym gazikiem
- pokryć ranę cienką warstwą odpowiedniego opatrunku (w fazie ostrej zalecany jest olejek)
- w przypadku głębokich odleżyn wypełnić wgłębienie nasączonym opatrunkiem i pozostawić na 48H
- zabezpieczyć bandażem lub plastrem
- czynność powtórzyć po 24H (rany płytkie)
- po rozpoczęciu procesu gojenia można zmniejszyć częstotliwość zmiany opatrunku na co 48H i 72H a w końcowej fazie nawet co kilka dni
- po rozpoczęciu zairyninowania można przejść na stosowanie konsystencji żelu (tańszy i szybciej się wchłania)
- preparat można stosować nawet w przypadku martwicy (pomoże pozbyć się martwej tkanki)
- w okresie zimowym plejek może ulegać krystalizacji. W takim przypadku należy zanurzyć go w ciepłej wodzie na ok 10 min. do uzyskania konsystencji olejku.

Produkty HYPEROIL to wielofunkcyjne, samowystarczalne, zaawansowane opatrunki, które pomagają w regeneracji i leczeniu skóry w przypadku jakiegokolwiek jej uszkodzenia.

Produkty HYPEROIL są w 100% pochodzenia roślinnego

To mieszanka dwóch olejków pozyskanych z drzewa Neem i Dziurawca

Produkty HYPEROIL możemy stosować w każdej fazie gojenia się ran, nie wymagając innych opatrunków ani dezynfekcji



Dla tego produktu REKOMENDUJEMY wybór przewoźnika POLTRAF Sp. z o.o. grupa UPS gwarantującego transport tego produktu w bezpiecznej dla towaru temperaturze pokojowej tj. 15-25°C bez względu na warunki atmosferyczne mróz czy upał. Wybór przez Klienta innego sposobu dostawy nie gwarantującego transportu i przechowywania przesyłek w temperaturze pokojowej 15-25°C, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może spowodować utratę właściwości fizycznych lub chemicznych produktu, pomimo zapakowania produktu przez Sprzedawcę na czas transportu wg określonych przez przewoźników standardów zabezpieczenia przesyłek kurierskich lub pocztowych.

