

## Zestaw T do nebulizacji pacjentów z tracheostomią lub zaintubowanych



Cena: 45,00 pln

### Opis słownikowy

Producent	Flexicare Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Zestaw T do nebulizacji i nawilżania dla pacjentów z tracheostomią (na rurkę tracheostomijną) lub zaintubowanych - na oddechu własnym.

#### Zestaw składa się z:

- Łącznik T, który w dolnej części jest kompatybilny z rurką intubacyjną lub rurką tracheostomijną, natomiast na ramionach łącznika T z jednej strony odbywa się wydech a z drugiej jest podłączenie do przedłużenia giętkiego
- Przedłużenie
- Nebulizator do deponowania cząstek w tchawicy i oskrzelach. Nebulizator należy przed użyciem rozkręcić i napełnić lekarstwem. Od dołu łączymy nebulizator "na wcisk" z drenem tlenowym gwiazdkowym, który podłączamy do przepływomierza. Optymalny przepływ przy prowadzeniu nebulizacji wynosi 6-8 litrów na minutę.
- Dren do tlenu 2.1 m