

## Zestaw VACUTEST próżniowy do pobierania moczu (pojemnik na mocz, probówka) - sterylny

Cena: 6,30 pln



### Opis słownikowy

Producent	EL-COMP
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Sterylny zestaw próżniowy VACUTEST do pobierania próbki moczu, w którego skład wchodzi idealnie dobrane dla zapewnienia pełnej wiarygodności badania pojemnik na mocz i probówka umożliwiające zarówno pobranie moczu, jak i bezpieczne umieszczenie materiału do badania w probówce.

#### Właściwości:

- wyrób sterylny
- zamknięcie typu twist
- materiał plastik

#### Instrukcja użytkowania:

1. W celu uzyskania próbki należy dokładnie umyć ręce i części intymne, założyć rękawiczki jednorazowe i ostrożnie odkręcić wieczko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
2. Wieczko odłożyć na czystą powierzchnię górną powierzchnią do dołu. Nie dotykać wewnętrznej powierzchni wieczka i pojemnika.
3. Pobrać próbkę moczu, napełniając go do 3/4 pojemności i szczelnie dokręcić wieczko.
4. Delikatnie wstrząsnąć zawartością pojemnika przed pobraniem próbki do probówki.
5. Częściowo unieść folię ochronną na wieczku (nie zdejmować jej całkowicie). Wewnątrz znajduje się igła, nie wkładać palca.
6. Włożyć probówkę, delikatnie nacisnąć. Probówka musi pozostać zanurzona do momentu aż się napełni i ustanie przepływ.
7. Wyjąć probówkę i ponownie nakleić folię ochronną.
8. Probówkę z moczem delikatnie potrząsnąć ok. 8-10 razy. Do laboratorium zanieść tylko probówkę.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA




**1**

Ostrożnie: w celu uzyskania próbki do badania laboratoryjnego, przed użyciem należy dokładnie umyć ręce i części intymne. Założyć rękawiczki jednorazowe. Otworzyć wieczko odkręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



**2**

Odłożyć wieczko górną powierzchnią do dołu na czystą powierzchnię.

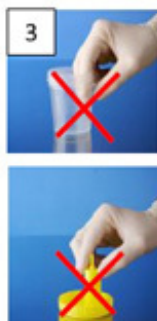

**3**

Nie dotykać wewnętrznej powierzchni pojemnika i wieczka.



**4**

Pobrać próbkę moczu. Pojemnik powinien zostać napełniony do ¾ pojemności.



**5**

Szczelnie dokręcić wieczko w kierunku ruchu wskazówek zegara.



**6**

Delikatnie wstrząsnąć próbkę przed pobraniem jej do probówki.



**7**

Częściowo unieść folię ochronną (nie zdejmować jej całkowicie). **WEWNĄTRZ ZNAJDUJE SIĘ IGŁA, NIE WKŁADAĆ PALCA!**



**8**

Włożyć probówkę. Delikatnie nacisnąć. Probówka musi pozostać zanurzona do momentu, aż się napelni (ustanie przepływ).



**9**

Wyjąć probówkę i ponownie dokładnie nakleić folię ochronną.



**10**

Probówkę z pobranym moczem delikatnie potrząsnąć, ok. 8-10 razy. Do laboratorium zanieść tylko probówkę.

### Zawartość zestawu:

- sterylny pojemnik na mocz 120 ml
- sterylna probówka 9 ml
- instrukcja użytkowania